

TITANS

RAMASON



M A N U A L



www.drv.es



RAMASON

TITANS

RAMASON



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Augmente et tonifie les muscles sans efforts
grâce aux courants FATI.

Versión: 2.0, Fecha: 29.01.2024.



SOMMAIRE

Note importante	4	5. Interface de l'appareil	20
1. INTRODUCTION	5	5.1 Vue d'ensemble du logiciel	20
1.1 Théorie	5		
1.2 Domaines de traitement	6	6. MAINTENANCE	21
1.3 Caractéristiques	6	6.1 Résolutions de problème	2
		6.1.1 Manque d'énergie	1
2. INSTALLATION	7	6.1.2 Problème d'écran tactile	2
2.1 Description générale	7		1
2.2 Spécifications	7	6.2 Entretien quotidien	21
2.3 Accessoires	7		1
2.4 Description des indications	8	7. Consentement informé	22
2.5 Description de l'appareil	9		
2.6 Connexion des pièces a main	9		
2.7 Connexion WIFI	10		
3. SECURITE	10		
3.1 Sécurité électrique	1		
3.2 Exigence de stockage	0		
	1		
	1		
4. TRAITEMENT	12		
4.1 Programmes et configurations spéciales	12		
4.2 Procédure	1		
	6		
4.2.1 Création et stockage de programmes	1		
	7		
4.3 Configuration étape par étape avant de démarrer	18		
4.4 Paramètres	1		
4.5 Contre-indications	8		
4.6 Effets secondaires possibles	1		
4.7 Utilisation potentielles	8		
	1		
	9		
	1		
	9		

FELICITATIONS !

Félicitations pour l'acquisition de Ramason Titans. Avant de profiter de ses fonctionnalités uniques, veuillez lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation sûre et optimale.

Droit d'auteur

Le manuel d'instructions est protégé Par le droit d'auteur et tous les droits sont réservés. Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis pour améliorer la qualité. CM International S.A. Détient les droits d'auteur de ce manuel d'utilisation. La reproduction totale ou partielle de ce manuel est interdite, ainsi que la reproduction sur d'autres supports sans le consentement écrit exprès de CM International S.A.

Les copies résultantes doivent être conserver le contenu inchangé et inclure les mêmes informations sur les droits d'auteur que dans l'original.

Avertissements

Veuillez particulièrement tenir compte des directives de sécurité suivantes. Seules les personnes autorisées, ayant la formation et les connaissances nécessaires doivent utiliser l'appareil ou aider aux procédures.

CM International S.A n'est pas responsable des paramètres, des techniques, des méthodes ou des résultats de l'utilisation de l'équipement. Les utilisateurs sont invités à appliquer leurs propres connaissances et expérience pour déterminer tous les aspects de la procédure, y compris la préparation avant le traitement, les mesures de sécurité, la technique, les réglages appropriés du dispositif, les intervalles de temps entre les traitements et les procédures post-traitement.

CM International S.A suppose que l'acheteur de Titans est pleinement formé et possède suffisamment de connaissances et d'expérience pour utiliser le produit de manière appropriée.

NOTE IMPORTANTE !

NE PAS OUVRIR ! RISQUE ELECTRIQUE !

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI LES VIS DE MONTAGE). A L'INTERIEUR, IL N'Y A PAS DE PIECES QUI PEUVENT ÊTRE REMPLACÉES PAR L'UTILSATEUR. TOUS LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE RÉALISÉ PAR LE DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE VOTRE PAYS.



1


INTRODUCTION

1.1 Théorie


Titans est doté de la technologie exclusive EGATI (Électromagnétisme focalisé à haute intensité), qui induit des contractions musculaires supra maximales. Cela conduit à l'hyperthrophie et à l'hyperplasie musculaire, augmentant la densité et le volume musculaire.

Les muscles réagissent par un remodelage profond de leur structure interne, c'est-à-dire la croissance des myofibrilles (hypertrophie musculaire) et la création de nouveaux filaments protéiques et de fibres musculaires (hyperplasie musculaire). Ce processus se traduit par une augmentation de la densité et du volume musculaire.


Les contractions volontaires peuvent augmenter la demande d'énergie des cellules graisseuses. L'épinéphrine libérée indique aux cellules adipeuses d'initier la lipolyse. Les graisses stockées sous forme de triglycérides se décomposent en acides gras libres (AGL) et le glycérol, qui sont utilisés comme sources d'énergie.

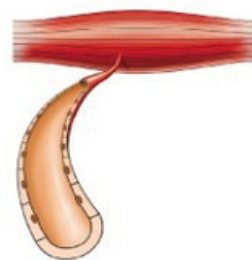

Les contractions supra maximales intenses augmentent la libération d'épinéphrine qui déclenche un effet en cascade conduisant à une lipolyse supra maximale dans les cellules adipeuses. Comme la stimulation est si rapide et intense, la réponse lipolytique est excessive et les AGL commencent à s'accumuler en excès dans les adipocytes.

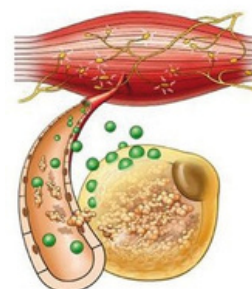

Le débordement de l'AGL provoque un dysfonctionnement cellulaire et l'induction de l'apoptose - la mort cellulaire programmée. Les cellules mortes s'effondrent et sont éliminées naturellement.

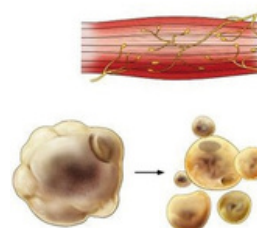

1.2 Zones de traitement

ABDOMEN



FESSES



CUISSES



Et bien d'autres en fonction des exigences du client et des connaissances de l'opérateur.

1.3 Caractéristiques

- ▶ Facile à utiliser
- ▶ Personnalisation selon les besoins de chaque client
- ▶ Non consommable

Pour garantir le bon fonctionnement et l'efficacité et la sécurité du traitement, il est nécessaire de respecter les points suivants:

- ▶ Installation correcte de l'équipement
- ▶ Entretien adéquat
- ▶ Connaissance de l'utilisateur de la technologie et du traitement effectué.

2

INSTALLATION

2.1 Description générale

L'équipement est monté, il suffit de fixer les supports des poignées sur les côtés de l'équipement et de placer les poignées sur les deux connecteurs correspondants. Ensuite, vous devez le connecter au WI-FI avant de commencer à travailler pour vous assurer que vous recevez Les dernières mises à jour.

2.2 Spécifications

Plage de tension d'entrée	95-120VAC, 220-250VAC
Courant nominal	13,6A
Consommation	3000W
Puissance nominale	2500VA
Poignées	2
Température de fonctionnement	18-35°C
Température de stockage	0-40°C
Niveau de bruit	45dB
Protection contre les risques électrique	Classe I, type B
Tesla	0,4-2,5
Largeur d'impulsion	300 microsecondes
Dimensions	108x38x49 cm
Poids	47 kg

2.3 Accessoires

	Nom	Image	Quantité (unité)
1	Tête		2
2	Cordon d'alimentation		1
3	Fusibles		2
4	Ceintures (tailles S,M,L)		3
5	Support de poignée		2

2.4 Description des indications



Symboles	Standard	Description
	ISO 15223-1	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter les instructions d'utilisation.
	IEC 60417	Rayonnement non ionisant (module WI-FI)
	IEC 60417	Usage intérieur uniquement
	ISO 15223-1	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter les instructions d'utilisation car elles contiennent des informations essentielles, telles que des avertissements et des précautions.
	IEC 60417	Pour identifier un type B conforme à la CEI. 60601-1
	BS EN 50419	Indique qu'un produit ne doit pas être éliminé dans une décharge; la barre noire indique que l'équipement a été fabriqué après 2005.

2.5 Description de l'appareil




1. Ecran et panneau principal.
2. Poignée et support de têtes.
3. Bouton d'arrêt d'urgence.
4. Bouton marche/arrêt
5. Connecteurs de poignées.
6. Roues avec freins pour la stabilité.

NOTE IMPORTANTE !

NE PAS COMMENCER UN TRAITEMENT AVEC LES
TETES À L'INTERIEUR DE LEUR SUPPORT.

2.6 Connexion de la pièce à main.

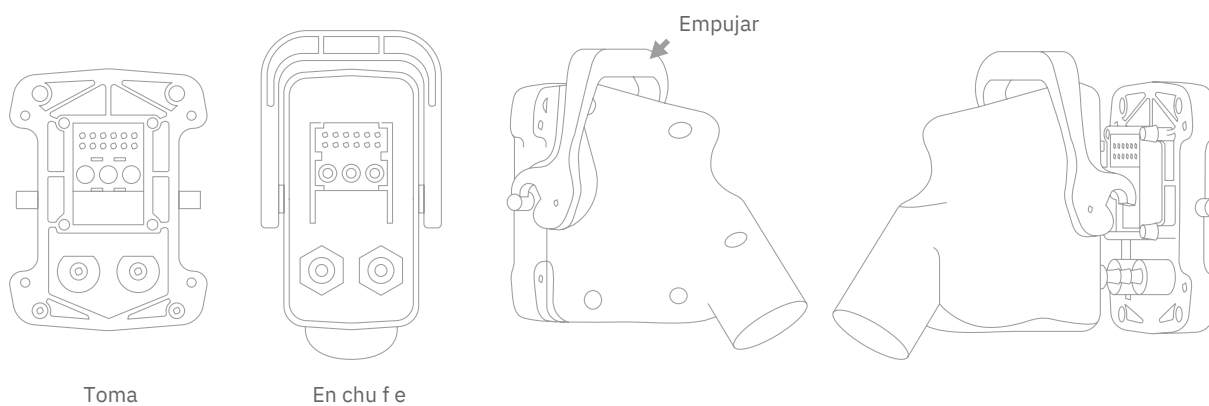

2.7 Connexion WI-FI

Titans se connecte au réseau WIFI de la même manière que les appareils portables (téléphones portables, ordinateurs, etc.).


Pour connecter l'appareil à Internet, il est nécessaire d'accéder à cet onglet dans les paramètres, puis de cliquer sur le bouton "liste des réseaux" et trouver le réseau WIFI préféré.

Une fois sélectionné, entrez la clé correcte et appuyez sur entrer.

L'ordinateur indiquera qu'il est connecté à un réseau WIFI.



**Il est indispensable d'être connecté avec une bonne intensité de signal (4-5 barres) pour recevoir immédiatement les dernières mises à jour.*

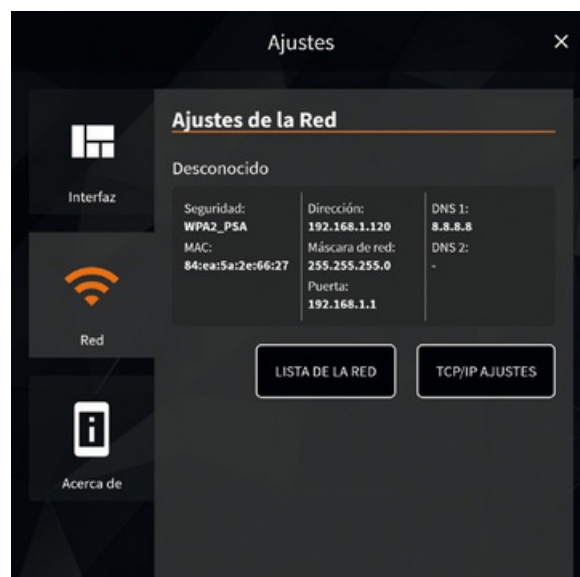

3

SECURITE

Chaque opérateur du Titans doit lire et comprendre ce manuel d'utilisation dans son intégralité avant de travailler avec l'équipement.

Avant de commencer tout traitement, l'opérateur doit s'assurer que l'appareil fonctionne correctement. CM International S.A n'est pas responsable des erreurs, dommages, pannes, etc. Qui se produisent en raison d'une utilisation inappropriée de l'équipement ou en raison d'une lecture et/ou d'une compréhension incomplètes de ce manuel d'utilisation.

Aucune modification ou réparation non officielle n'est autorisée. CM International S.A ne sera pas responsable des problèmes ou des dommages causés par des techniciens non autorisés et la garantie sera perdue dans tous les cas. Il est interdit d'utiliser des équipements endommagés ou incomplets.

3.1 Sécurité électrique

- ▶ L'équipement fonctionne avec 230V $\pm$ 10% 50Hz.
- ▶ L'alimentation et les circuits d'alimentation à l'intérieur de l'appareil contiennent un disjoncteur différentiel (DDR) et différent magnétothermique approprié.

- ▶ A l'intérieur de l'appareil, la tension est extrêmement élevée (elle atteint 400V), même après l'avoir débranché de l'alimentation électrique. C'est interdit d'ouvrir la cage et toute autre manipulation de celle-ci.

CONNEXION ADEQUATE

- ▶ Titans utilise une source électrique de haute puissance, vous devez donc vous assurer que l'appareil est correctement connecté au cordon d'alimentation.
- ▶ Utilisez le câble d'alimentation fourni par le fabricant pour garantir des performances optimales de l'appareil.

INSPECTION PERIODIQUE

- ▶ Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation et les câbles associés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- ▶ Si le cordon d'alimentation ou les câbles sont endommagés, informez immédiatement le fournisseur pour résoudre le problème.

PRISE DÉDIÉE

- Utilisez une prise de courant unique avec la capacité appropriée pour l'appareil, afin d'éviter de surcharger les circuits et de garantir une alimentation électrique constante.

EXIGENCE DE MISE À LA TERRE

- N'utilisez pas l'équipement si la fiche de mise à la terre de la prise est endommagée ou manquante.
- Une connexion à la terre adéquate est essentielle à la sécurité de l'utilisateur et au fonctionnement de l'appareil.

ACTIONS INTERDITES

- Evitez strictement d'essayer de réparer ou de modifier vous-même les composants électrique de l'appareil.
- Contactez le distributeur ou le personnel autorisé pour toute réparation ou modification.

DEBRANCHER LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de l'alimentation.
- Cela permet de conserver l'énergie et de garantir la sécurité pendant les périodes d'inactivité.

3.2 Exigences de stockage

ENVIRONNEMENT SEC ET FRAIS

- Conservez les Titans dans un environnement sec et frais.
- Évitez les zones très humides, car l'humidité peut affecter les composants électroniques.

PROTEGER DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES

- Evitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, froides et chaudes.
- Une exposition prolongée à des conditions extrêmes peut compromettre les performances de l'appareil.

EVITEZ LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL

- Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil. Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut provoquer une surchauffe et affecter les matériaux et le fonctionnement de l'appareil.

ESPACE DE STOCKAGE SECURISE

- Recherchez un espace de stockage sécurisé où l'appareil est protégé contre les dommages physiques tels que les chocs, les chutes ou les écrasements.
- Assurez-vous que vous conservez dans un endroit où il ne tombe pas ou ne se cogne pas.

PROTEGEZ-LE DE LA POUSSIÈRE ET DE LA SALETÉ

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, couvrez l'appareil pour le protéger de la poussière et de la saleté.
- C'est particulièrement important si l'appareil a des ports ouverts ou des zones où les particules peuvent s'accumuler.

CONTENEUR OU SAC APPROPRIÉ

- Si possible, conservez l'appareil dans son emballage d'origine ou dans un étui de protection fourni par le fabricant.
- Cela permet de protéger l'appareil de dommages éventuels pendant le stockage.

GARDEZ-LE A L'ECART DES LIQUIDES

- Gardez l'appareil à l'écart des liquides pour éviter les déversements accidentels ou l'exposition à l'humidité.
- Les liquides peuvent endommager les composants internes et provoquer des dysfonctionnements.

STOCKAGE SECURISE DES CABLES

- Si l'appareil est livré avec des câbles détachables, rangez-les de manière ordonnée et sécurisée pour éviter d'éventuels dommages.
- Envisagez d'utiliser des organisateurs de câbles ou brides pour un rangement organisé.

PROTEGEZ-LES DES POLLUANTS ENVIRONNEMENTAUX

- Si l'environnement de stockage est sujet aux contaminants tels que la poussière ou les poils d'animaux, prenez des précautions supplémentaires pour protéger l'appareil.
- Une housse de protection peut être utile dans ces situations.

EVITEZ LE STOCKAGE PRÈS DES CHAMPS MAGNETIQUES

- ▶ Gardez l'appareil à l'écart des champs magnétiques puissants, car ils peuvent interférer avec les composants électroniques.
- ▶ Cela inclut d'éviter le stockage près des grands haut-parleurs, d'aimants puissants ou appareils électroniques qui génèrent des champs magnétiques significatifs.

INSPECTION PERIODIQUE AVANT UTILISATION

- ▶ Avant d'utiliser l'appareil après une période de stockage, effectuez une inspection visuelle pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles, de composants lâches ou de signes d'usure.

En suivant ces recommandations de stockage, les utilisateurs peuvent aider à maintenir les Titans dans des conditions optimales, en assurant des fonctionnalités appropriées si nécessaire et pendant les périodes de non-utilisation.

4

TRAITEMENT




Cet appareil ne doit être travaillé que sur des peaux saines.

Il est essentiel que le client et l'opérateur retirent tous les objets métalliques du corps et des poches pendant la manipulation et l'utilisation de l'équipement, en particulier les appareils électroniques. Ceux-ci peuvent subir des dommages irréversibles s'ils entrent à proximité des poignées du Titans.

Tous les éléments métalliques doivent être retirés et tenus à l'écart de l'équipement, sans aucune exception.

Si le client est porteur d'une prothèse métallique ou d'un élément métallique non amovible, il doit préalablement consulter l'opérateur et son médecin pour vérifier le matériau dont il est composé et la possibilité ou l'interdiction d'effectuer un traitement par Titans.

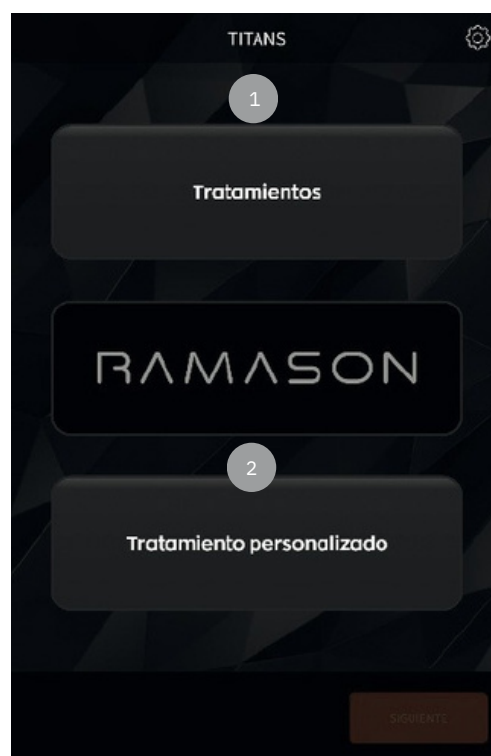

4.1 Programmes et configurations spéciales

Titans vous permet de travailler de deux manières différentes:

- ▶ Traitements: vous pouvez choisir dans une longue liste séquences préétablies.
- ▶ Traitement personnalisé: vous pouvez concevoir un programme librement et l'enregistrer ultérieurement si vous le souhaitez.
Vous pouvez sélectionner le nombre de phase (-5), la fréquence et la durée de chaque phase, et la durée totale du traitement.

1. Choisissez les traitements à sélectionner dans une liste de programmes pré configurés.
2. Sélectionnez un traitement personnalisé pour concevoir un traitement en fonction des caractéristiques requises. Vous pouvez conserver le traitement pour des séances ultérieures.

SELECTIONNER LE PROGRAMME POUR EFFECTUER LE TRAVAIL

- ▶ **CELLULOPLASIE 3D:** programme spécial pour travailler la cellulite dans toutes ses phases.
- ▶ **CONTOUR BODY 360:** programme spécifique pour aider à compléter le travail en surpoids, obésité et perte de poids.
- ▶ **V-LIFT BUM:** programme spécial pour le travail dans la région fessière.
- ▶ **SCULPT CORE:** programme conçu pour travailler la zone de l'abdomen.
- ▶ **PROGRAMME SPÉCIAL FEMME:** ensemble de programmes spéciaux conçus pour les femmes.
- ▶ **RAFFERMIR/TONIFICATION:** musculature (hypertrophie et hyperplasie)
- ▶ **DRAINAGE/CIRCULATION:** programmes spéciaux pour drainer.
- ▶ **AIDES MÉTABOLIQUES:** programmes spéciaux en complément d'autres traitements.

Selección de tratamiento

Volver

Paso 1: Selección de tratamiento

Categoría Tipo de procedimiento

Tratamientos personalizados

Celuplastia 3D

Contour body 360

V-Lift bum

Sculpt core

Programa especial mujer

Reafirmación/tonificación

Drenaje/Circulación

Ayudas metabólicas

SIGUIENTE

PROGRAMME DE CELLULITE 3D

Sélectionnez le programme en fonction du type de cellulite que vous souhaitez utiliser, type 4, type 3 ou type 2.

Placez les poignées dans la zone de travail et sélectionnez le programme phase 1R, le type de cellulite que vous souhaitez utiliser. L'intensité doit être adaptée de manière personnalisée et indépendante à chaque tête, en tenant compte de la tolérance du client.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le programme phase 2M de celui-ci. Sélectionner le type de cellulite.

Enfin, choisissez le programme phase 3D, adaptez l'intensité du travail en fonction de la tolérance du client.

Selección de tratamiento

Volver

Paso 2: Selección de tratamiento

✓ Celuplastia 3D ✓ Celulitis tipo 4 Fase 1 R

Celulitis tipo 4 Fase 1 R

Celulitis tipo 4 Fase 2 M

Celulitis tipo 4 Fase 3 D

Celulitis tipo 3 Fase 1 R

Celulitis tipo 3 Fase 2 M

Celulitis tipo 3 Fase 3 D

Celulitis tipo 2 Fase 1 R

Celulitis tipo 2 Fase 2 M

Celulitis tipo 2 Fase 3 D

SIGUIENTE

PROGRAMME CONTOUR BODY 360


Placez les poignées dans la zone de travail et sélectionnez le programme jour 1 F1 (phase 1) : augmentation musculaire.

Augmentez progressivement l'intensité de manière personnalisée et indépendante sur chaque poignée, en tenant compte de la tolérance du client.

A la fin du programme, activez le jour 2 F2: activation morphologique, adaptez l'intensité en fonction de la tolérance du client.

Dans les séances suivantes, changez le programme en fonction du jour de travail (Jour 1, jour 2, jour 3). Une fois le cycle de 3 jours terminé, répétez les cycles à partir du jour 1.

Il est important que chaque journée de travail effectuée les deux phases du programme.

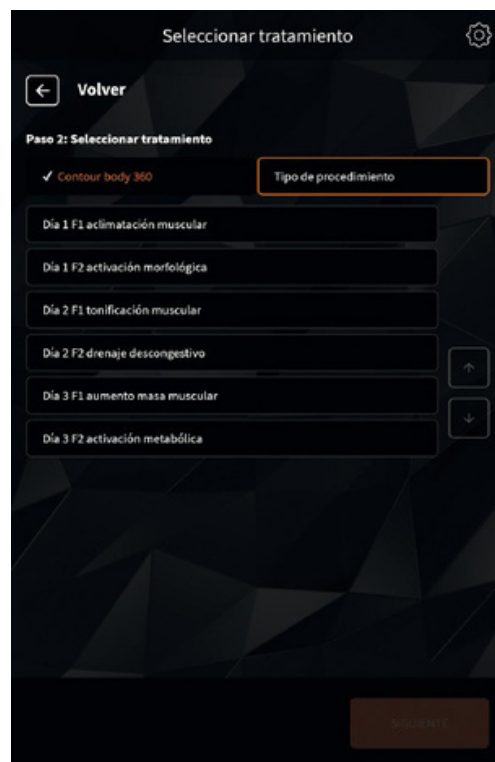

PROGRAMME V-LIFT BUM


Placez les poignées dans la zone de travail et sélectionnez le programme de la phase 1 qui vous convient le mieux pour effectuer le travail (F1 élimination de la cellulite fessière ou F1 élimination de la peau d'orange).

Augmentez progressivement l'intensité de manière personnalisée et indépendante à chaque tête en tenant compte de la tolérance du client.

A la fin du programme, sélectionnez la phase 2 qui vous convient le mieux pour votre séance (F2 lifting fessier supérieur ou F2 élévation fessier inférieur). Réglez l'intensité du travail.

Lorsque vous avez terminé, programmez la dernière phase de la session en sélectionnant la plus appropriée (F3 augmentation du volume ou F3 Définition fessier).

Dans les séances suivantes, changez le programme en fonction des besoins, en effectuant toujours les 3 phases.

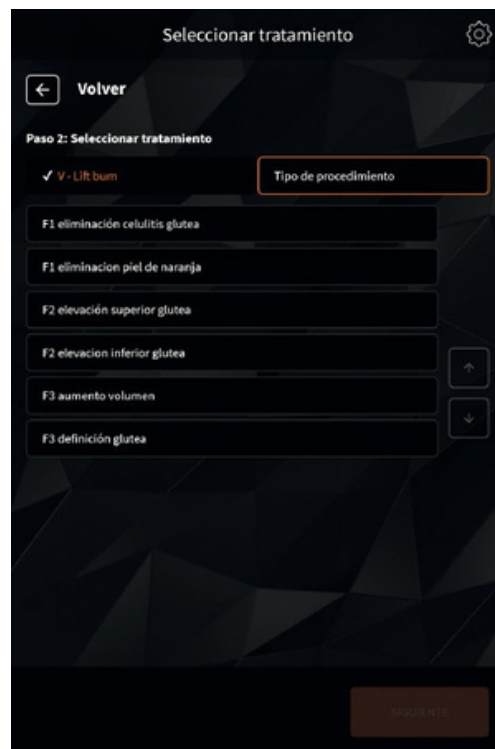

PROGRAMME SCULPT CORE

Le programme SCULPT CORE est spécifique pour travailler la zone de l'abdomen.


Placez les poignées dans la zone de travail et sélectionnez le programme jour 1 F1: activation.

Augmentez progressivement l'intensité de manière personnalisée et indépendante sur chaque poignée, en tenant compte de la tolérance du client.

A la fin du programme, activez le jour 2 F2: libération myofasciale, adaptez l'intensité en fonction de la tolérance du client.

Dans les sessions suivantes, changez le programme en fonction du jour de travail (jour 1, jour 2, jour 3 et jour 4). Une fois le cycle de 4 jours terminé, répétez à nouveau les cycles en commençant par le jour 1.

Il est important que chaque jour de travail effectue les deux phases du programme.

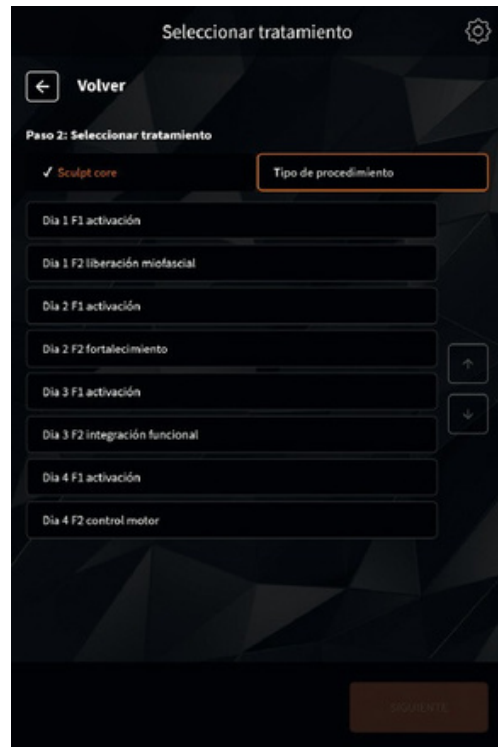


PROGRAMME SPECIAL FEMME

Placez les poignées dans la zone de travail et sélectionnez le programme le plus appropriée pour l'objectif de la session.

Dans le cas du programme de travail spécial ménopause , effectuez les 3 phases dans la même séance, en sélectionnant l'une des phases de chaque type qui vous convient le mieux en réalisant un total de 3.

Augmentez progressivement l'intensité de manière personnalisée etolérance indépendante à chaque tête, en tenant compte de la tolérance du client.

Il est important que chaque jour de travail effectue les trois phases du programme.

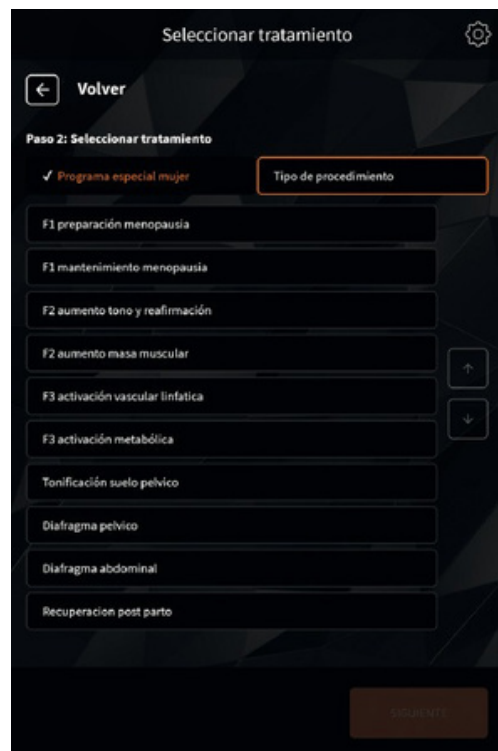

4.2 Procédure

Une fois que vous avez sélectionné le programme de travail, vous pouvez augmenter l'intensité de chaque tête indépendamment (tête gauche et droite) en faisant glisser le cercle tactile manuellement ou en appuyant sur le symbole + et - de chaque manípule.

1. Vous pouvez augmenter l'intensité de chaque tête indépendamment en faisant glisser le cercle tactile de manière manuelle ou en appuyant sur le symbole + et -.
2. Chaque programme peut avoir différentes séquences de fréquences de 3 à 5 de manière pré configurée.
3. Les phases de chaque cycle et la durée peuvent être modifiées, mais cela modifiera les résultats du traitement programmé, il n'est donc pas recommandé. Si vous souhaitez programmer d'autres traitements de manière libre, vous pouvez le faire dans le menu initial en choisissant "traitements personnalisés".
4. Temps de travail total du programme. Ce temps peut être modifié, mais n'est pas recommandé dans le cas des séances de traitement avec différentes phases. Si vous modifiez ce temps, vous modifierez le travail total.

****Vous ne devez jamais augmenter l'intensité des têtes lorsqu'elles sont sur le support. Cela peut entraîner des dommages irréversibles à la fois à l'équipement et aux manipulateurs.***

Il doit être fait une fois qu'ils sont positionnés sur le client.




1. Pour commencer le traitement, appuyez sur le bouton DÉMARRER.
Si vous souhaitez mettre le traitement en pause, appuyez à nouveau sur la touche ARRETER.
2. Augmentez l'intensité indépendamment à chaque poignée, adaptez l'intensité pendant la séance car à chaque cycle la fréquence change et la perception du client peut être différente.
3. A la fin du programme, l'équipement s'arrêtera, au cas où vous voudriez interrompre le programme ou sortir du menu principal, appuyez sur TERMINER.



La différence de fréquence se traduit par une stimulation différente de muscle. Mais chaque fréquence effectue également un travail différent sur d'autres tissus. Ce n'est pas pour travailler plus souvent que nous faisons une action plus intense sur le muscle, c'est pourquoi nous recommandons de suivre les protocoles de travail prédéfinis.

Notez que chaque fois que vous utilisez le Titans, il fonctionne avec trois types d'énergies différentes: des courants de haute intensité, des champs électromagnétiques focalisés et des courants inductifs de haute tonification (la base du courant EFATI). Pour cette raison, les sensations du client peuvent être très différentes selon le protocole de travail qu'il choisit.


4.2.1 Creación y almacenamiento de programas personalizados

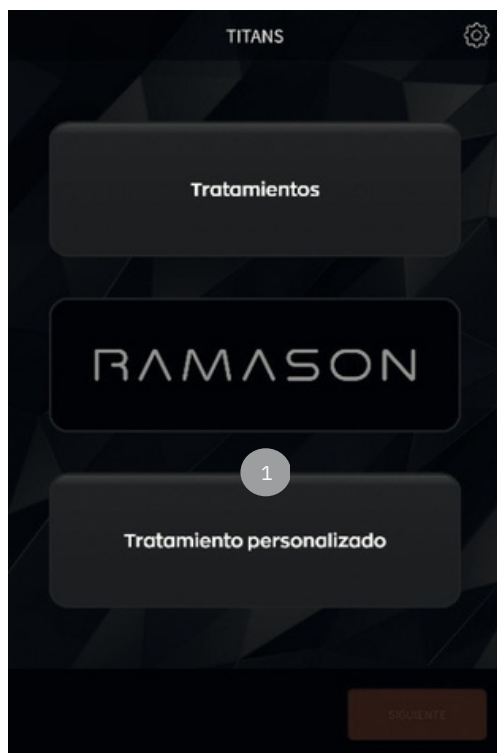

1. Pour créer de nouveaux programmes ou configurer des cycles de travail personnalisés, sélectionnez "traitements personnalisés"



1. Vous pouvez ajouter le nombre de cycles que vous souhaitez en appuyant sur le symbole +, en créant 3 à 5 cycles par traitement.
2. Sélectionnez la fréquence et le temps de travail de chaque cycle de forme indépendante, ceux-ci resteront enregistrés permettant de changer de phase pour sa configuration.
3. Réglez le temps de travail total du traitement. A la fin de ces temps, l'équipement s'arrêtera, répétant tous les cycles en fonction du temps programmé de chacun d'eux.
4. Pour enregistrer le programme crée, appuyer sur l'icône du disque  en haut à droite de l'écran.

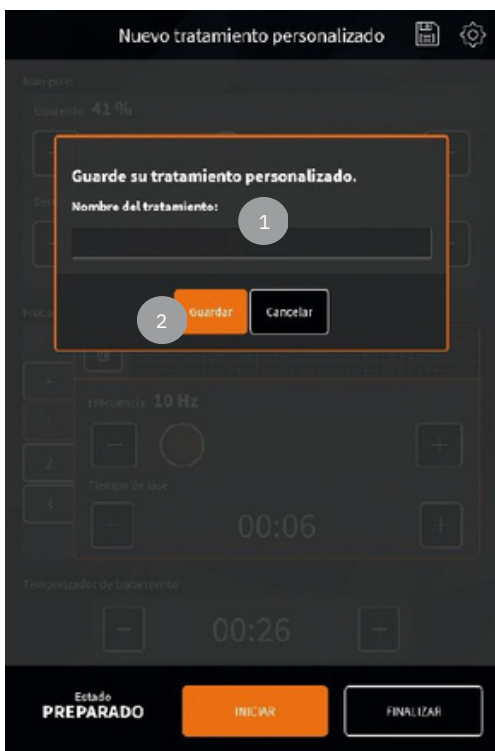

1. Saisissez le nom du programme que vous souhaitez créer et appuyer sur **ENTRER** sur le clavier virtuel qui apparaît.
2. Ensuite, appuyez sur **ENREGISTER**, pour sauver la configuration du programme crée.

Une fois enregistré, le programme crée peut être trouvé dans traitements, dans la section **Traitements personnalisés**



Si vous appuyez sur ANNULER, cet écran apparaîtra pour confirmer que vous souhaitez quitter le programme sans l'enregistrer.

4.3 Configuration étape par étape de commencer un traitement

Cet équipement est conçu pour gérer EFATI (électromagnétisme focalisé de haute tonification et intensité) en utilisant une combinaison de trois courants différents selon l'objectif de chaque client.

L traitement est effectué dans l'ordre suivant:

- Diagnostic et sélection du traitement.
- Demander au client les contre-indications du traitement. Retirer tous les accessoires métalliques (téléphone portable, clés de voiture, bijoux, etc.)
- Configuration de l'équipement .
- Suivez les étapes du point 4.1. Nous Vous recommandons de suivre les traitements prédéfinis pour garantir la sécurité et l'efficacité.
- Titans utilise trois courants : courant de haute intensité, électromagnétisme focalisé et courant inductifs à haute tonification. La séquence et la durée de chacune d'elles déterminent la différence de sensations et de résultats entre les différents traitements.

4.4 Paramètres

Ils doivent toujours être ajustés en fonction de la tolérance du client. Cela peut changer entre les séances en raison de la tolérance, du développement musculaire et de nombreux autres facteurs internes et externes. N'oubliez pas que le cercle central de la pièce à main doit être placé dans la zone de traitement principale pour optimiser les résultats.

Il ne devrait y avoir aucune douleur ou inconfort pendant le traitement. Si c'est le cas, essayez de changer la position des pièces à main et/ou de réduire l'intensité d'utilisation.

4.5 Contre-indications

- Implants électriques : stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, etc.
- Stents (moins de 6 mois après leur mise en place).
- Implants métalliques dans ou à proximité de la zone de traitement (prothèse, etc).
- Femmes enceintes ou allaitantes.
- Plaies ouvertes sur la peau ou coups de soleil sur la zone de traitement.
- Intolérance cutanée.
- Chirurgie récente.

- ▶ Chéloïde existant dans la zone de traitement.
- ▶ Maladie ou affection grave.
- ▶ Maladie chronique non traitée (cardiovasculaire, respiratoire, métabolique, auto-immune, etc).
- ▶ Troubles de la coagulation.
- ▶ Epilepsie (pourrait potentiellement déclencher un épisode convulsif).
- ▶ Dystrophie musculaire ou arthrite aiguë dans la zone de traitement.
- ▶ Clients atteints de cancer.
- ▶ Thrombose ou thrombophlébite, obstruction artérielle sévère.
- ▶ Insuffisance veineuse sévère.
- ▶ Hernies abdominales ou inguinales.
- ▶ Implants mammaires
- ▶ Objectifs de traitement peu réalistes.

4.6 Effets secondaires possibles

Dans la plupart des cas, ils seront dus à une utilisation, une configuration ou une durée inappropriées du traitement. De plus la plupart de ces effets secondaires sont légers et temporaires.

- ▶ Douleurs musculaires ou crampes pendant le traitement.
- ▶ Douleur ou fatigue musculaire après le traitement.
- ▶ Dommages ou lésions Tissulaires (muscle, nerfs, etc.).
- ▶ Rhabdomyolyse (rare et due à une utilisation inappropriée du dispositif).

4.7 Utilisations potentielles

Les utilisations potentielles des Titans sont énumérées ci-dessous. Il convient de noter que l'exécution de l'un d'entre eux dépend de l'expérience antérieure et de la formation de chaque utilisateur. Les utilisations potentielles de cet appareil ne se limitent pas à celles énumérées et dépendent des connaissances de chaque utilisateur.

CELLULOPLASIE 3D: programme spécial pour travailler la cellulite dans toutes les phases.

CONTOUR BODY 360: Programme spécifique pour aider à compléter le travail en surpoids, obésité et perte de poids.


V-LIFT BUM: Programme spécial pour les travaux dans la région fessière.

SCULPT CORE: Programme conçu pour travailler la zone de l'abdomen.


PROGRAMME SPECIAL FEMME: Ensemble de programmes spéciaux conçus pour les femmes.

RAFFERMISSEMENT/TONIFICATION: programme spécial muscle (hypertrophie et hyperplasie).


DRAINAGE/CIRCULATION: Programmes de drainage.

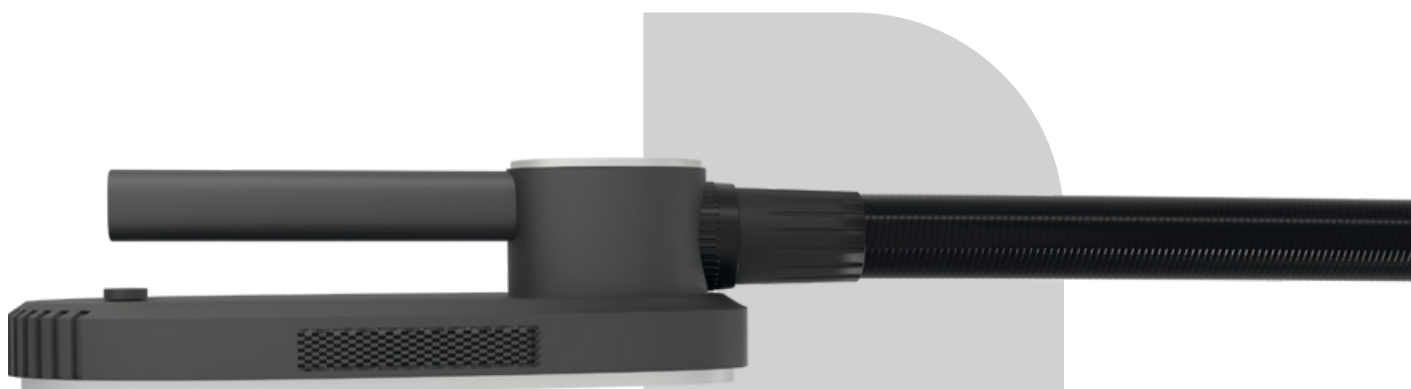

5.1 Vue d'ensemble du logiciel

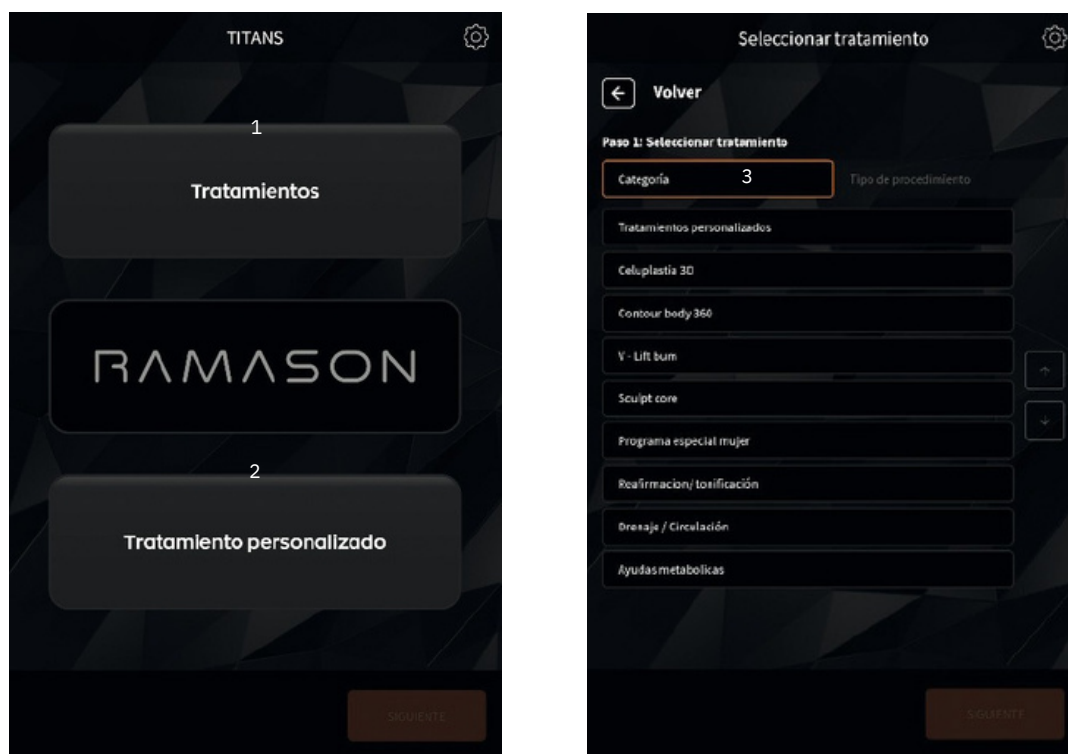

1. Choisissez TRAITEMENTS à sélectionner dans une liste de programmes préconfigurés.
2. Choisissez TRAITEMENTS PERSONNALISÉS pour configurer un traitement individuellement.
3. Choisissez la catégorie de traitement.

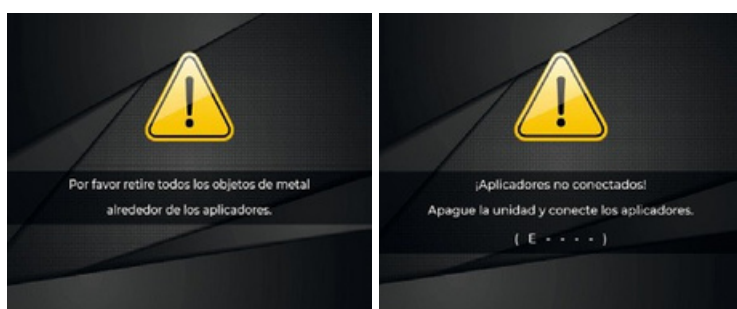

AVIS IMPORTANTS

Nous serons avertis lorsque des objets métalliques seront détectés à proximité des poignées ou lorsque ceux-ci ne sont pas connectés.

6.1 Résolutions de problèmes

6.1.1 Manque d'énergie

CAUSES POSSIBLES

- ▶ L'interrupteur principal derrière la machine est éteint.
- ▶ Le fusible de l'entrée d'alimentation est endommagé.
- ▶ Le cordon d'alimentation est endommagé ou présente un court-circuit.
- ▶ Manque de puissance dans la prise de courant.

RESOLUTION DE PROBLÈMES

- ▶ Assurez-vous que l'interrupteur principal situé derrière l'équipement est allumé.
Vérifiez que le fusible de l'entrée d'alimentation n'est pas endommagé; changez-le si nécessaire.
- ▶ Inspectez le cordon d'alimentation à la recherche de dommages ou de signes de court-circuit ; remplacez-le si nécessaire.
- ▶ Vérifiez la sortie de courant dans la prise de courant en testant avec un autre appareil.

6.2 Entretien quotidien

Placez l'équipement dans un endroit sec, ventilé et sans poussière.

L'équipement ne doit être utilisé que par des professionnels. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil.

Nettoyez les poignées, les supports et l'écran après utilisation.

Remarque: ce manuel d'utilisation est conforme aux normes pour garantir une expérience sûre et efficace. Pour toute question ou requête, veuillez contacter votre distributeur officiel.

6.1.2 Problèmes avec l'écran tactile

CAUSES POSSIBLES

- ▶ Interférences à haute tension, vérifiez s'il y a des équipements électriques de haute puissance dans le réseau environnant. L'écran est trop fermement fixé. Desserrez les quatre vis qui fixent l'écran.

RESOLUTION DES PROBLÈMES

- ▶ Vérifiez s'il y a des interférences de haute tension d'équipements électriques de haute puissance à proximité. Si vous les trouvez, éloignez l'équipement de ces sources. Si l'écran est trop fixe, desserrez les quatre vis qui le fixent. Si le problème persiste et est lié au logiciel, envisagez de remplacer la carte de contrôle. Contactez notre service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.



CONSENTEMENT INFORME

TITANS : TRAITEMENT DU CORPS

Date et ville _____

Nom et prénom _____ N° de téléphone _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____ Pays _____

Par la présence, JE DEMANDE ET AUTORISE que ce qui suit me soit fait : me soumettre au traitement d'électromagnétisme focalisé à haute intensité et tonification (EFATI) à travers l'appareil TITANS en

_____.

Je déclare qu'avant le traitement, jl m'a été expliqué verbalement et que j'ai été entièrement satisfait(e) et compris(e) par les informations reçues sur la procédure, la technologie utilisée, mon engagement à suivre les directives reçues, les instructions d'utilisation, les caractéristiques et les contre-indications du traitement.

J'ai été informé du traitement esthétique que je souhaite recevoir et de son taux de réussite, de l'utilisation de pré et directives et/ou de cosmétiques Que je dois suivre avant et après le traitement, et que pour toutes question sur ma santé ou sur le traitement, je dois consulter au préalable mon médecin, étant informé qu'il s'agit d'un traitement qui ne convient qu'aux personnes en bonne santé.

Je déclare que j'ai été informé De manière claire et détaillée de la nature de la procédure esthétique d'électromagnétisme focalisé de haute intensité et tonification (EFATI) utilisée dans les zones corporelles suivantes: _____

Avec les fins esthétique de: _____

BREVE DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE

L'électromagnétisme focalisé de haute intensité et tonification (EFATI) induit des contractions musculaires supracorvéales qui ne peuvent être obtenues par une action volontaire. En s'exposant à des contractions supracorvéales, le tissu musculaire est obligé de s'adapter à de telles conditions pour s'adapter à de telles conditions produisant un effet optimal. Le muscle répond par un remodelage profond de sa structure interne, c'est-à dire par la croissance des myofibrilles (hypertrophie musculaire) et la création de nouveaux filaments protéiques et de fibres musculaires (hyperplasie). Ce processus se traduit par une augmentation de la densité et le volume musculaire.

Au début du traitement, il est essentiel de déterminer quelles zones seront traitées: bras, jambes, fesses et abdomen. Sa profondeur est de 15cm, l'intensité jusqu'à 3,5 teslas par poignées et une largeur d'impulsion allant jsuqu'à 285 microsecondes.

Les pièces à main peuvent être appliquées sur la peau du client, les vêtements ou à 3cm de la zone à traiter à l'aide d'un bras articulé. Il dispose de plus de 50 programmes.

J'ai été informé de la nécessité de plusieurs séances, variant entre 4 et 8 séances par zone, que je réaliserai entre 1 à 3 fois apr semaine, pour obtenir des résultats optimaux et ils ont résolu mes doutes lors de l'embauche. Ils m'ont expliqué les étapes à suivre et les instructions d'utilisation de Titans dans la zone contractée de manière simple et compréhensible pour moi.

J'accepte de recevoir le traitement qui m'a été expliqué à des fins esthétiques demandées par moi. Je suis conscient que les résultats peuvent varier, en fonction des facteurs individuels, donc je suis informé des instructions du traitement et ses contre-indications.

Spécifications et conséquences de la technologie utilisée avec Titans et en particulier ce que je demande et autorise à réaliser dans la zone convenue.

PRECAUTIONS

Ne pas appliquer sur quoi que ce soit de métallique : Piercings dans la zone à traiter, ceintures dans la zone à traiter, boucles, pièces de monnaie, etc., ni avoir à proximité des clés de voiture, des appareils électroniques ou des cartes de crédit ou similaires.

CONTRE-INDICATIONS

- ▶ Implants électriques: stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, etc.
- ▶ Stents (moins de six mois après leur mise en place). Implants métalliques dans ou à proximité de la zone de traitement (prothèses, etc).
- ▶ Femmes enceintes ou allaitantes.
- ▶ Plaies ouvertes sur la peau ou coups de soleil sur la zone de traitement.
- ▶ Intolérance cutanée.
- ▶ Chirurgie récente.
- ▶ Chéloïde existant dans la zone de traitement.
- ▶ Maladie ou affection grave.
- ▶ Maladie chronique non traitée (cardiovasculaire, respiratoire, métabolique, auto-immune, etc).
- ▶ Éviter le traitement sur une ou près de la poitrine.
- ▶ Troubles de la coagulation.
- ▶ Épilepsie (pourrait potentiellement déclencher un épisode convulsif).
- ▶ Dystrophie musculaire ou arthrite aiguë dans la zone de traitement.
- ▶ Clients atteints de cancer.
- ▶ Thrombose ou thrombophlébite, obstruction artérielle sévère.
- ▶ Insuffisance veineuse sévère.
- ▶ Hernies abdominales ou inguinales.
- ▶ Implants mammaires.
- ▶ Objectifs de traitement peu réalistes;

SPECIFICATIONS

N'utilisez pas le traitement Titans si vous souffrez d'une maladie. Si j'ai des questions, je consulterai mon médecin. Le traitement ne doit être effectué que par des personnes en bonne santé, à la peau saine, pleinement capables, conscientes et informées.

La durée du traitement peut varier et nécessiter un nombre différent de séances en fonction de l'état de santé, de l'âge, de la zone à traiter et des conditions et habitudes génétiques de l'individu. Si vous prenez des médicaments, consultez toujours votre médecin.

J'accepte que des photos soient prises de chaque session pour évaluer les résultats, ainsi que pour prendre des mesures et collecter des données.

CONSEQUENCES ET EFFETS SECONDAIRES

Dans la plupart des cas, aucun effet secondaire indésirable n'est observé.

Peut produire une hyperémie cutanée.

On m'a expliqué les précautions à prendre pour éviter ces effets secondaires graves tels que la consommation d'alcool, de drogues et de repas copieux.

J'ai lu et compris ce formulaire de consentement, je déclare être complètement honnête sur ma santé lorsque j'ai donnée mon dossier médical, car j'en suis entièrement responsable.

PROTECTION DES DONNEES

Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur sur la protection des données à caractère personnel, nous vous informons que les données des représentants légaux signataires de ce contrat ainsi que tout autre personne dont les données personnelles sont collectées dans le présent contrat en tant qu'interlocuteurs dans les relations pour l'exécution de celui-ci reconnaissent être informées et consentantes à ce que ces données personnelles, ainsi que celles générées lors de l'exécution de la relation contractuelle, soient traitées sous la responsabilité de chacune des parties dans le but de réaliser la gestion, le développement, l'exécution et le contrôle de la relation contractuelle ainsi que l'envoi postal ou électronique de communications et de documentations, l'agenda des contacts et la tenue des historiques des relations commerciales. De même, les parties intéressées sont informées que les données seront transférées à des tiers dans le cas prévu par la loi, tels que les auditeurs financiers, les organismes d'organisation compétents pour des raisons de contrôle, d'enregistrement et d'inspection et les signataires publics en cas de publication du document.

Les titulaires des données s'engagent à communiquer dans les plus brefs délais à chacune des parties, toutes variations des données contenues dans le présent contrat ou celles générées lors de l'exécution de celui-ci, afin que ladite entité puisse procéder à sa mise à jour. En attendant que le contraire ne soit pas communiqué à chacune des parties par les personnes concernées sont exactes et à jour.

Dans le cas où l'une des parties doit fournir des données à caractère personnel relatives à des personnes physiques autre que celle identifiées dans le présent contrat pour l'exécution de celui-ci, elle doit, préalablement à son inclusion, les informer des éléments contenus dans cette clause. A cet effet, la communication de données personnelles de tiers est conditionnée au principe de nécessité et la communication nécessite au préalable d'informer et de demander le consentement de ces tiers pour le traitement de vos données conformément aux termes contenus dans la présente communication.

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, chaque personne a le droit d'obtenir des informations, de confirmer si l'autre partie traite ses données personnelles. Par conséquent, elle a le droit d'accéder à ses données personnelles, de rectifier les données inexactes ou de demander leur suppression lorsque les données ne sont plus nécessaires, ainsi que d'exercer les autres droits énoncés dans la réglementation de la manière expliquée dans les informations supplémentaires. Vous pouvez exercer les droits mentionnés dans les termes établis dans la réglementation en vigueur en vous adressant par écrit sur chacune des parties aux adresses figurant au début de présent contrat.

De même, vous pouvez demander aux mêmes coordonnées, des informations supplémentaires détaillées sur notre politique de protections de données

Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur sur la protection des données à caractère personnel, nous vous informons que vos données personnelles seront traitées par _____

_____, en qualité de responsable du traitement dans le but d'offrir des services d'esthétique personnalisés et/ou de formation du traitement/produits.

Nous vous informons que vos données peuvent être communiquées à des tiers et à des professionnels afin de pouvoir procéder aux fins avec lesquelles vous nous avez fourni vos données, par exemple, des entreprises de transport, des conseils externes, des services informatiques, etc. De même, nous vous informons que, sauf obligation légale ou consentement exprès de votre part, notre société ne cédera pas vos données à des tiers autres que ceux, le cas échéant, identifiés ici et/ou ceux établis par une obligation légale.

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur le fait que nous traitons vos données personnelles, par conséquent, vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles, de rectifier les données inexactes ou de demander leur suppression lorsque les données ne sont plus nécessaires, ainsi que d'exercer les autres droits énoncés par la réglementation de la manière expliquée dans les informations supplémentaires. Vous pouvez exercer tous les droits dans les termes établis dans la réglementation en vigueur

_____, Tel.
_____. Ou à
l'email: _____.

De même, vous pouvez demander aux mêmes coordonnées, des informations supplémentaires détaillées sur notre politique de protection des données.

J'autorise le traitement ou l'utilisation de mes données personnelles à des fins de formation, commerciales et publicitaires par le responsable du traitement via WhatsApp, téléphone, e-mail.

OUI	Ou	NON
-----	----	-----

JE CONFIRME qu'après la réalisation des examens et l'élaboration d'un diagnostic personnalisé, j'ai été informé en détail et de manière compréhensible de l'effet (séances approximatives) et de la nature de la procédure à réaliser, ainsi que des risques et des éventuelles altérations qui pourrait conduire à une inefficacité du traitement. Je n'ai également omis ni modifié aucune des données de la fiche diagnostic ou de mon dossier médical et clinique chirurgical; en particulier, ceux qui pourraient affecter directement ou indirectement le traitement. De même, j'assume personnellement chacun des risque possibles découlant du traitement dont j'ai été informé , en accordant mon consentement pour que le traitement soit effectué avec la plate-forme lumineuse Procyon. De même, vous pouvez consulter nos informations supplémentaires dans la politique de confidentialité et protections de données de _____

_____,
Notre site web: _____
_____.

Signature du client

Signature de l'esthéticienne



TITANS

RAMASON



M E R C I

Nous espérons avoir été utile



TITANS

RAMASON

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



info@drv.es / +34 902 100 021
Calle Oro, 10 - Colmenar Viejo
28770 Madrid